



QM – Quality management




Bolzano, 19 gennaio 2021

Gentile Cliente,

la informiamo che, a partire dalla data odierna, il dispositivo “Filtro antibatterico per aspiratore” sarà disponibile alla vendita nei due codici:

- **BSU999**
- **M03.1.003**

Il dispositivo verrà inoltre venduto singolarmente e non più come set.

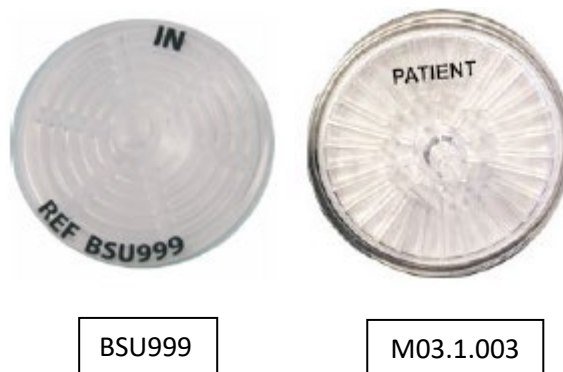

Specifichiamo che i due codici presentano delle caratteristiche tecniche e funzionalità analoghe. Indipendentemente dal codice ordinato, il filtro di protezione protegge infatti il circuito di aspirazione da eventuali agenti contaminanti aspirati durante l'uso. Il filtro è prodotto con materiale idrofobo PTFE che impedisce l'ingresso di fluidi nel circuito pneumatico. Il filtro è monouso e deve essere sostituito dopo ogni utilizzo. In caso di contaminazione, decolorazione e maggiore resistenza all'aspirazione, deve sempre essere sostituito.

Il filtro, disponibile in entrambi i codici, non è prodotto dall'azienda Boscarol.

Come evidente dalle foto sopra riportate, i due codici si differenziano esclusivamente per la scritta riportata in superficie. Tale scritta non influisce sulla funzionalità del dispositivo, ma vuole fornire informazioni sul suo corretto utilizzo. In particolare:

- Il dispositivo identificato dal codice BSU999 ha la scritta "IN" sul lato che deve essere collegato alla presa "VACUUM" sul coperchio.
- Il dispositivo identificato dal codice M03.1.003 ha la scritta "PATIENT" sul lato che deve essere collegato alla presa "VACUUM" sul coperchio.

La mancata osservanza di questo dettaglio può causare guasti al filtro e contaminare il circuito di aspirazione dell'unità di aspirazione.



QM – Quality management

Per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo, vi invitiamo sempre a leggere attentamente e completamente le istruzioni d'uso dei nostri aspiratori medicali di secreti, disponibili anche in versione elettronica sul nostro sito.

Vi invitiamo inoltre a contattarci per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

QM/RAQ-BM

Quality Manager & Regulatory Affairs

Dott.ssa Marchetti Benedetta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benedetta Marchetti'.