



**STR110462**

## **PINZA TOGLI ZECCHIE IN PLASTICA USO ANIM.**

- Pinza toglie zecche in plastica per animali
- La forma a penna e consente di catturare la zecca dal corpo per poi estrarla con un movimento rotatorio. È importante estrarla in modo corretto per evitare infezioni
- Dimensioni: 9 cm
- Colori assortiti casuali
- Modalità d'uso:
- Proteggere le mani con guanti o un fazzoletto durante l'operazione, per evitare la possibilità di infezione attraverso piccole lesioni della pelle.
- Impugnare la pinza ed afferrare saldamente la zecca, il più possibile aderente alla cute; premere il pulsante superiore per consentire la presa della zecca e rilasciarlo lentamente; esercitare una delicata rotazione in senso antiorario e tirare leggermente, ma senza strappi, per evitarne la rottura;
- Se il rostro della zecca rimane all'interno della pelle, estrarlo con l'aiuto di un ago sterile. Eventuali residui del corpo della zecca rimasti nella pelle di solito non comportano conseguenze;
- Applicare disinfettanti e antibiotici sulla parte interessata solo dopo l'estrazione della zecca, evitando quelli che colorano la pelle (tintura di iodio, mercurocromo) perché potrebbero mascherare segni di infezione;
- La zecca estratta va messa in un contenitore chiuso con alcool, petrolio o altra sostanza per essere uccisa. Non va assolutamente schiacciata altrimenti si spargerebbero le sue uova.

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl